



LINDHE XTEND

make it possible

Gebruiksaanwijzing

XTEND FOOT H100



CE

XTEND FOOT

XTEND FOOT H100

Figuur 1: De voet en zijn verschillende onderdelen

Een volledige voet bestaat uit drie hoofd delen:

- 1) Voet uit vezelcomposiet:
 - A) Composiet voorvoet
 - B) Composiet hiel
 - C) Composiet voetzool
 - D) Piramide
- 2) Cosmetische overtrek
- 3) Beschermende kous



Figuur 2: Maat- en gewichtstabel

Het is belangrijk dat elke patiënt de juiste voetprothese krijgt aangemeten. Bij de keuze van een voetprothese moet de onderstaande tabel worden gevolgd. Voordat de voetprothese wordt geplaatst, moet het artikelnummer in de onderstaande tabel worden vergeleken met het nummer op de piramide van de voet. Controleer ook altijd of de gewichtscategorie van de patiënt correct is en niet tussentijds gewijzigd is.

Categorie	Voetmaat [cm]:	23	24	25	26	27	28	29
P3	40–60 kg / 90–130 lb.	H100-323	H100-324					
P4	61–80 kg / 131–175 lb.	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	81–100 kg / 176–220 lb.	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	100–125 kg / 221–275 lb.			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629

BEOOGD GEBRUIK:

Xtend Foot is een voetprothese die bedoeld is voor gebruik in geval van een amputatie boven of onder de knie ter vervanging van een menselijke voet. De voetprothese is geschikt voor mensen die een natuurlijke en flexibele gang op oneffen oppervlakken willen met behulp van een voetprothese. De voetprothese moet op een buisklemadapter worden bevestigd die is vastgemaakt aan de rest van de prothese.

INSTRUCTIES VOOR DE PATIËNT:

- De patiënt moet de buitenzijde van de cosmetische overtrek minstens eenmaal per week reinigen. Wij raden daarvoor warm water en een mild reinigingsmiddel aan.
- Als de cosmetische overtrek versleten is, moet deze onmiddellijk door een prothesist worden vervangen.
- Als de voet lawaai maakt, moet deze zo snel mogelijk door een prothesist worden nagekeken. Dit geldt ook wanneer de voet niet goed werkt.
- Let op voor een veranderde of verminderde werking. Voorbeelden hiervan zijn een verminderde schokabsorptie of laterale flexibiliteit en een verlies van voorwaartse elasticiteit. Neem in dat geval contact op met

uw prothesist en gebruik het product niet meer totdat de werking ervan is onderzocht.


- Wij raden aan om de voet elke zes maanden door een prothesist te laten controleren. Bij een zeer actief gebruik kan een sneller onderhoud nodig zijn.
- De voet is waterbestendig. Als de voet met water in contact is gekomen of in water is ondergedompeld, moeten de voet en de cosmetische overtrek worden uitgespoeld en gedroogd. Zorg er echter voor dat de patiënt de cosmetische overtrek niet losmaakt van de voet. Dit mag enkel door erkende prothesisten gebeuren.
- Als er aan de binnenzijde van de cosmetische overtrek zand of vuil is terechtgekomen, moet de prothesist deze zo snel mogelijk reinigen en controleren.
- De voetprothese is ontworpen voor gebruik bij temperaturen van -20 °C tot +60 °C.
- Wij raden aan om de prothese met kousen en schoenen te dragen omdat dit de levensduur van de voet verlengt.
- Vergeet niet dat het tot 14 dagen kan duren om aan een nieuwe voetprothese gewend te raken. Omdat de voet een natuurlijk bewegingspatroon stimuleert, kunnen de

spieren in het geamputeerde been van tijd tot tijd pijn doen wanneer u de prothese pas gebruikt.

- Als u opeens veel bijkomt of afvalt, moet u bij uw prothesist langsgaan om te controleren of de categorie van de voetprothese nog geschikt is.
- U moet ook zwaar tillen, bv. van zware rugzakken, vermijden omdat dit de totale belasting op de voet beïnvloedt. Als u vaak zware lasten draagt, is het beter om een voet uit een hogere gewichtsklasse te gebruiken. Praat er in dit geval over met uw prothesist.
- Deze voet is niet ontworpen om te joggen, hard te lopen of te springen, of voor andere intensieve sportactiviteiten.

INSTRUCTIES VOOR DE ORTHOPEDISCHE PRAKTIJK:

- Overloop met de patiënt de onderhouds- en gebruiksinstructies wanneer het product wordt aangepast.
- Gebruik de maat- en gewichtstabel van Lindhe Xtend om het juiste product voor de patiënt te vinden.
- Enkel een erkende prothesist mag het product op patiënten testen.

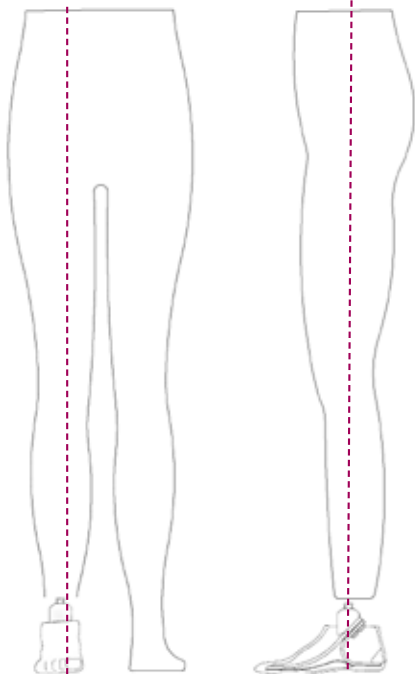

BEVESTIGING

Xtend Foot bestaat uit drie verschillende gelagde delen die tijdens het gebruik op elkaar inwerken om voldoende energie te produceren terwijl de voet oneffen oppervlakken opvangt. De piramide zorgt ervoor dat de voetprothese goed past op een beenprothese/buisstructuur.

! **WAARSCHUWING** Enkel opgeleid personeel zoals een prothesist mag het product bevestigen, onderhouden en op patiënten/gebruikers aanpassen.

! **WAARSCHUWING:** Verwijder de piramide niet en wijzig ook de constructie van de voet niet. Bij wijzigingen aan het product vervalt de garantie.

AANPASSING

De voet moet aan de patiënt worden aangepast voor een zo groot mogelijk comfort. Houd rekening met de volgende instructies om een goede pasvorm te verzekeren.

Dynamische aanpassing


Plaats de voet zo dat de loodlijn van sagitaal gezien door het achterste derde deel van de voet loopt. Plaats de voet zo dat het midden van de

knie en het midden van de piramide, frontaal gezien, in lijn staan tussen de eerste en tweede teen.

Xtend Foot is flexibel op oneffen oppervlakken en hoeft niet te worden aangepast voor verschillende oppervlakken. Dit wordt door de constructie van de voet zelf opgevangen.

Statische aanpassing

De voetprothese is ontworpen voor een hiel van 10 mm hoog. De voetprothese moet in de cosmetische overtrek worden geplaatst wanneer deze op de patiënt wordt getest. De prothese kan in een schoen worden gedragen of er kan anderszins een sleehak worden gebruikt om de hoogte juist aan te passen. Bevestig de voetprothese en draai de inbusschroeven op moment (15 Nm) vast nadat er Loctite is aangebracht op de inbusschroeven.

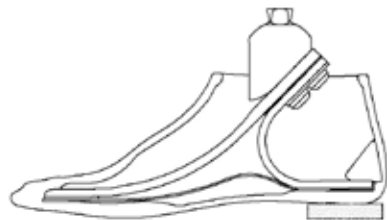


VASTZETTEN EN LAATSTE AANPASSING

De vier stelschroeven voor de buisvormige kokeradapter moeten gelijkmatig worden aangespannen met een nominaal koppel van 15 Nm. Zodra ze in de juiste positie zitten, moeten de tapuiteinden met Loctite 636K13 worden geborgd.

AANBRENGEN VAN COSMETISCHE OVERTREK


Behandel de cosmetische overtrek op een verantwoorde manier om de werking en levensduur ervan te verlengen.

Gebruik nooit scherpe voorwerpen zoals schroevendraaiers om de cosmetische overtrek aan te brengen of te verwijderen. We raden ook aan om de cosmetische overtrek niet aan te brengen terwijl de patiënt de voetprothese al draagt.

 Er mag enkel een cosmetische overtrek van Lindhe Xtend worden gebruikt in combinatie met de voet uit vezelcomposiet.

Ga als volgt te werk:

- Trek de beschermende kous over de voet uit vezelcomposiet.
- Plaats de voorvoet zo ver mogelijk in de cosmetische overtrek en plaats een schoenlepel tussen het uiteinde van de hiel en de cosmetische overtrek. Zorg ervoor dat de overtrek de onderkant aan de binnenzijde raakt.
- Duw de hiel voorzichtig op zijn plaats. Zorg ervoor dat de voet uiteindelijk rechtop en in de juiste inkepingen aan de binnenzijde van de cosmetische overtrek terecht komt.
- Trek de schoenlepel weg en controleer of de gelaagde hiel van de composietvoet in de hielvergrendeling in de cosmetische overtrek klikt (zie figuur A).

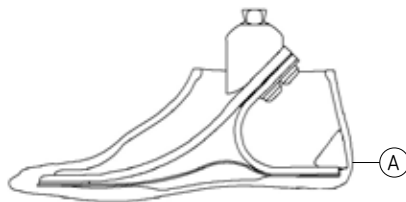

VERWIJDEREN VAN COSMETISCHE OVERTREK:

- Plaats de voet zo op een bank dat de hiel over de rand van de bank uitsteekt.
- Duw de cosmetische overtrek aan de hiel met uw hand naar beneden zodat deze uit de hielhouder losklikt. Gebruik zo nodig een schoenlepel om voorzichtig op de hielvergrendeling aan de binnenzijde te duwen.



WAARSCHUWINGEN:

- Het product is niet ontworpen om te joggen, hard te lopen of intensief te sporten, zoals balsporten, fitnessen of vergelijkbare activiteiten. Dit geldt ook voor springen of intensief dansen.
- Gebruik de voet niet zonder een cosmetische overtrek.
- Enkel cosmetische overtrekken van Lindhe Xtend mogen worden gebruikt.
- Gebruik de voet niet zonder een beschermende kous.
- Haal de piramide nooit van de voetprothese af.
- Gebruik geen erg zure en basische reinigingsproducten om de onderdelen van de voetprothese te reinigen.

- Gebruik een voet die op een andere patiënt werd getest niet opnieuw.
- De voetprothesen van Lindhe Xtend zijn voorzien van een piramidekoppeling, wat een veelgebruikt koppelstuk is. Het is de verantwoordelijkheid van de prothesist om dit koppelstuk correct op andere protheseonderdelen aan te passen.
- De gebruiker kan aan nieuwe omgevingsrisico's worden blootgesteld als hij niet vertrouwd is met een flexibele voet.
- De voetprothese mag NIET door de gebruiker of orthopedisch ingenieur worden aangepast of gewijzigd buiten de productspecificaties.

GARANTIE:

Garantie van 24 maanden vanaf de datum van verzending. Als de gebruiksaanwijzing niet wordt gevolgd, vervalt de garantie. Als de gewichtsaanbevelingen niet worden gevolgd of als de voet wordt blootgesteld aan onredelijke belasting, zoals zwaar tillen, intensieve sporten of vergelijkbare activiteiten die aan een normale voet letsel zouden kunnen toebrengen, vervalt de garantie.

Het oranje materiaal is een actief materiaal uit vezelcomposiet, dat ontworpen is voor laterale flexibiliteit. Dit kan oppervlakkige barsten in de gelaagde delen veroorzaken. Dit is volledig normaal en de voet zal blijven werken. Neem contact op met uw leverancier als u vragen heeft.

KLANTENTEVREDENHEIDSGARANTIE

Wij bieden een niet-tevreden-geld-teruggarantie van 30 dagen vanaf de datum van verzending. Als u niet tevreden bent, kunt u het product terugsturen waarna u het volledige bedrag wordt terugbetaald.

VEELGESTELDE VRAGEN VAN PATIËNTEN

Wat doe ik als ik niet tevreden ben met de voet?

Wij bieden een niet-tevreden-geld-teruggarantie van 30 dagen op de voet. Als de patiënt binnen die periode niet tevreden is, kan de voet worden teruggestuurd en terugbetaald.

Hoelang duurt de garantieperiode?

Linde Xtend AB biedt een garantie van 2 jaar op de voet. Op de cosmetische overtrekken geldt een garantie van 6 maanden bij normaal gebruik. De levensduur van de voet neemt aanzienlijk toe als hij met schoenen en kousen wordt gedragen.

Kan de piramide worden verwijderd zodat de voet rechtstreeks op een koker kan worden bevestigd?

Nee, de piramide kan niet worden verwijderd of aangepast. Bij verwijdering of aanpassing vervalt de garantie en loopt de patiënt het risico op letsels.

Wat is het maximale gewicht voor Xtend Foot?

Het maximale gewicht voor het gebruik van Xtend Foot bedraagt 125 kg / 275 lb. (categorie P6). Er geldt echter een maximaal gewicht voor elke categorie van de voet, zodat de voet steeds veilig, functioneel en duurzaam is. Zie de maat- en gewichtstabel op pagina 2).

Welke andere onderdelen, bv. kniegewrichten, kunnen er met Xtend Foot worden gecombineerd?

Het koppelstuk tussen de Xtend Foot en andere systemen is een veelgebruikte piramide aansluiting die kan worden toegepast met de piramide compatibele systemen.

De voet maakt lawaai. Wat kan ik hieraan doen?

De oorzaak van het lawaai moet worden onderzocht. Neem contact op met uw prothesist. De prothesist kan de cosmetische overtrek verwijderen en kan de voet uit vezelcomposiet en de cosmetische overtrek met perslucht of een zachte doek reinigen. Controleer de voet op zichtbare schade of vuil. Zorg er ook voor

dat de beschermende kous intact is en niet beschadigd is. Breng daarna de cosmetische overtrek aan zoals hierboven wordt beschreven en bevestig de prothese opnieuw aan de patiënt.

Als het lawaai aanwezig blijft, neemt u contact op met uw leverancier.

Kan ik met de Xtend Foot hardlopen?

Deze voet is niet ontwikkeld om hard te lopen of voor andere sportactiviteiten. Daarom raden we voor de veiligheid en duurzaamheid van de voet af om met Xtend Foot hard te lopen.



Lindhe Xtend AB

Olofsdalsvägen 40B, 302 41 Halmstad, Zweden

info@lindhe.se

Tel.: +46 (0) 35 262 92 00

www.lindhextend.com

