

Användarinstruktion

XTEND COVER C100



XTEND COVER C100

Ett Xtend Cover består av följande delar:

- Framsida med naturmaterial
- Lackad baksida med mönster
- 2 st 25 mm svarta M4 skruvar för den nedre ihopfästningen av fram- och baksida
- 2 st kortare gummidistanser på insidan av främre delen av skyddet
- 1 st längre gummidistans på insidan av bakre delen av skyddet

Med i leveransen finns också ett extra set med gummidistanser samt två extra skruvar.

AVSEDD ANVÄNDNING

Xtend Cover är en accessoar avsedd att användas av protesanvändare som är lårbensamputerade och har mekanisk eller microprocessor-styrd knäled. Produkten kan användas både med eller utan långa byxor.

FÖRBEREDELSE:

Börja med att anpassa tre av gummidistanserna till rätt längd för just den knäled som skyddet ska monteras på. Riktlinjer för hur långa de bör vara:

Knäled Rheo knee	Längd gummidistanser
Främre distanser (2 st)	ca 13 mm
Bakre distans (1 st)	ca 32,5 mm
Knäled C-leg	Längd gummidistanser
Främre distanser (2 st)	ca 13 mm
Bakre distans (1 st)	ca 32,5 mm

MONTERINGSANVISNING:

- Det kan vara en fördel att montera skyddet innan man tar på sig protesen.
- Börja med att se till att de två kortare gummidistanserna sitter på plats på insidan av främre delen av skyddet samt att den något längre distansen sitter på insidan av den bakre delen (Bild 1)
- För ihop de två delarna runt protesen med ovankanten på framsidan i höjd med övre kanten på själva knäleden (Bild 2)
- Efter att höjden på skyddet justerats till rätt läge snäpps de övre fästena ihop.
- Efter att höjden på skyddet justerats till rätt läge snäpps de övre fästena ihop (Bild 3)
- Håll sedan skyddet på plats nertill och skruva växelvis i de två skruvarna i de avsedda hålen vid nedre fästena på baksidan så långt det går. Vi rekommenderar att man skruvar i båda skruvarna innan man drar dem den sista biten ända in (Bild 4)
- Nu ska fram- och baksidan av skyddet sitta jämt lodrätt mot varandra i sidoskarvarna (Bild 5)



Bild 1

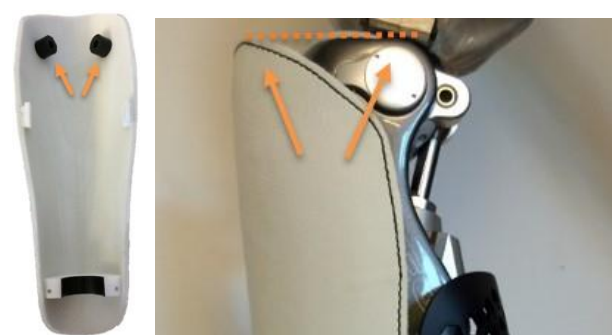


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

SKÖTSELINSTRUKTION

- Rengör skyddet med en fuktig trasa och använd ett mildt rengöringsmedel till de delar som inte är klädda med skinn.
- Vid fläckar eller behov av mer omfattande rengöring av skinnet så rekommenderar vi att man använder en mjuk svamp tillsammans med sadeltvål. Blöt svampen, gnugga in lite sadeltvål och gör rent genom att gnida in tvålen i cirklar på skinnet. Ta därefter direkt en torr trasa eller handduk och torka av. Skinnet ska inte genomblötas, utan endast yttlig rengöring.
- Skinnet håller längre om man ca 2-3 gånger om året gnider in det med fett, t.ex. bivax, som får torka in över natten. Därefter torkas eventuellt överflöd av med en mjuk trasa.
- Om snäpplåset har lossnat på grund av yttre påverkan kan det snäppas ihop igen om skyddet fortfarande sitter i rätt läge och inte är löst vid den nedre fästpunkten.
- Om skyddet sitter löst eller har hamnat ur läge så rekommenderar vi att man skruvar isär det och monterar det på nytt enligt ovan instruktion för att undvika skador.
- Garantin omfattar inte slitageskador på skinnet.

 Lindhe Xtend AB
Linjegatan 3D
SE-302 50 Halmstad
www.lindhextend.com