



LINDHE XTEND

make it possible



XTEND CONNECT

XTEND CONNECT

# När användaren tar makten över sina proteser



Låst läge.



Öppet läge.

Xtend Connect är något helt nytt som löser ett flertal vardagsproblem som protesanvändaren ställs inför. Genom att använda Xtend Connect kan du passa ihop olika protesdelar på ett unikt och anpassat sätt för användaren, beroende på livssituation och aktiviteter.

**Svårt att få vardagen att gå ihop med ständiga byten av kompletta protesben för olika aktiviteter?** Inte längre ett problem. Med Xtend Connect byter man snabbt från en aktivitetsfot till en vardagsfot och behåller samma hylsa så användaren slipper släpa med sig kompletta uppsättningar. Eller byt snabbt mellan högklackat och vardagsfot, självklart utan att rubba de viktiga inställningarna.

**Svårt att hitta en bra hylsa och kopian blir aldrig lika bra?** Inte längre ett problem. När man väl har fått rätt hylsa så kan man använda samma hylsa till flera olika aktiviteter, genom att snabbt och enkelt byta övriga komponenter.

**Svårt att ta av ytterskorna?** Inte längre ett problem. Med Xtend Connect kopplar man snabbt av foten med

ytterskorna och byter till inomhusfot. Som då självklart har rätt inställningar för inomhusbruk. Lättare och snabbare än att ta av och på ytterskor på stela protesfötter.

**Svårt att få på tajta byxor?** Inte längre ett problem. Med Xtend Connect kopplar man snabbt av foten och trär på byxorna. Och med ett snabbt enhandsgrepp så är foten tillbaks igen och de tajta byxorna sitter som en smäck.

**Svårt att få plats med allt i resväskan?** Inte längre ett problem. Genom att använda Xtend Connect behöver man inte packa ner kompletta protesben. Ta bara med en extrafot till utflykten eller en badfot så är användaren redo att resa lättare.



# Tips på anpassningar av Xtend Connect

Xtend Connect har en stor inbyggd flexibilitet och passar de flesta konfigurationer.



## BYTE AV FÖTTER:

Eftersom olika fötter har olika höjd, tänk på att montera Xtend Connect så högt upp på röret som ansluter till protesfoten som möjligt. På så sätt kan du justera för olika protesfotshöjd genom att kapa anslutningsröret i rätt höjd. Det är också lättare för protesanvändaren att byta foten om det finns ett rör att hålla i.

Tänk också på att du måste beställa två underdelar för de olika fötterna.



## BYTE AV BYXOR:

Här kan du sätta Xtend Connect var du vill men det är lättare att trä på smala byxor ju längre ner mot protesfoten som kopplingen sitter.



## BYTE AV KNÄLED:

Tänk på att det kan vara tungt att byta knäleden för protesanvändaren och här krävs ofta att man använder båda händerna vid bytet.

Alignment är mycket viktigt och det uppnår du lättast om du använder honpyramiden som anslutningsdel mot knäleden.

Var inte rädd för att vända på Xtend Connect, så att snabbfästet kommer nedåt. Det påverkar inte funktionen av komponenten och kan ibland vara lättare för patienten att hantera.

Om användaren har rätt till två olika typer av aktivitetsproteser är Xtend Connect en utmärkt produkt för att istället spara in ett komplett protesben. Om man istället väljer en Xtend Connect som bas och kompletterar t ex med en sportfot blir det billigare än ett komplett protesben.

## Checklista:

- Behåll favorithylsan och spara plats.
- Smidigt vid resor, slipper packa flera kompletta protesben.
- Byt komplett fot istället för skor, mycket enklare och snabbare.
- Lägre kostnad för aktivitetsproteser.
- Högre valfrihet av komponenter och därmed högre livskvalitet.
- Undviker dubbelreceptering av kompletta protesben.



# XTEND CONNECT OCH DESS OLIKA DELAR

En grundsats av Xtend Connect består av två huvuddelar:

**QUICK FIT UNIT.** Snabbfäste som kan öppnas och stängas med hjälp ett låshjul och en säkerhetstryckknapp.

**BASE UNIT.** En basdel som passas in i snabbfästet.


Varje del av Xtend Connect har olika möjligheter till anslutning till övriga proteskomponenter. Flera anslutningar finns för optimal anpassning till anslutande komponenter.

Alla anslutningslösningar kan också kombineras fritt enligt diagrammet nedan. Alla delar kan vändas på vilket håll som helst.


För byte av fot eller knäled krävs antingen två basdelar eller två quick fit units.

A) Låshjul  
B) Säkerhetstryckknapp

C) Basdel  
D) Snabbfäste

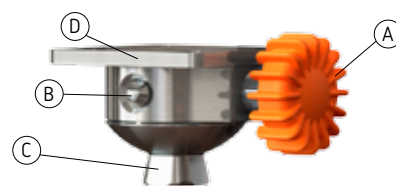

Exemplet visar snabbfäste med 4-hålsadapter och basdel med honpyramid.

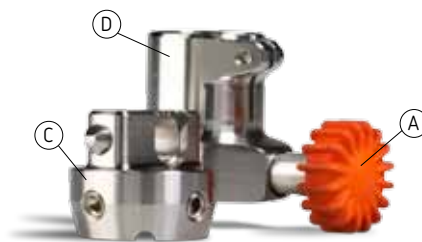

Exemplet visar snabbfäste med rörklämma 30 mm och basdel med honpyramid.

## Quick fit units (snabbfästen)

Artikelnummer	Beskrivning
A100-Q30	Xtend Connect snabbfäste med rörklämma 30 mm, orange version
A100-Q30-B	Xtend Connect snabbfäste med rörklämma 30 mm, svart version
A100-Q4	Xtend Connect snabbfäste med 4-hålsadapter, orange version
A100-Q4-B	Xtend Connect snabbfäste med 4-hålsadapter, svart version
A100-QF	Xtend Connect snabbfäste med honpyramidadapter, orange version
A100-QF-B	Xtend Connect snabbfäste med honpyramidadapter, svart version

## Base-units (basdelar)

Artikelnummer	Beskrivning
A100-BF	Xtend Connect basdel med honpyramidadapter
A100-BM	Xtend Connect basdel med hanpyramidadapter

Material: Rostfritt stål

Maxvikt: 100 kg

Kontrollera alltid att patientens vikt stämmer.

Maxvikten får absolut inte överskridas.



Lindhe Xtend AB

Linjegatan 3D, SE-302 50 Halmstad, Sweden, +46 (0)35 262 92 00  
info@lindhe.se, www.lindhextend.com