


Bruksanvisning Pasient

XTEND CONNECT A100

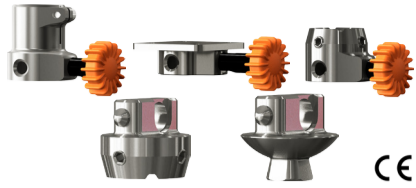

XTEND CONNECT


STØRRELSSES- OG VEKTVÆILEDNING

Maksimumsvekten for Xtend Connect er 100 kg. Maksvekten må absolutt ikke overskrides.

XTEND CONNECT OG DENS FORSKJELLIGE DELER


Xtend Connect består av to deler:

- Hurtigfestet – Kan åpnes og lukkes ved hjelp av et låsehjul og en sikkerhetstrykknapp
- Basisdel – Passes inn i hurtigfestet.

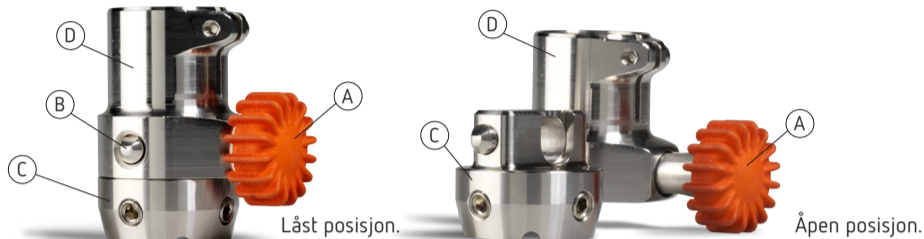

- A) Låsehjul
- B) Sikkerhetstrykknapp
- C) Basisdel
- D) Hurtigfeste

Xtend Connect finnes i ulike varianter som passer til ulike proteser. Den varianten som er tilpasset for deg, er merket med et kryss.

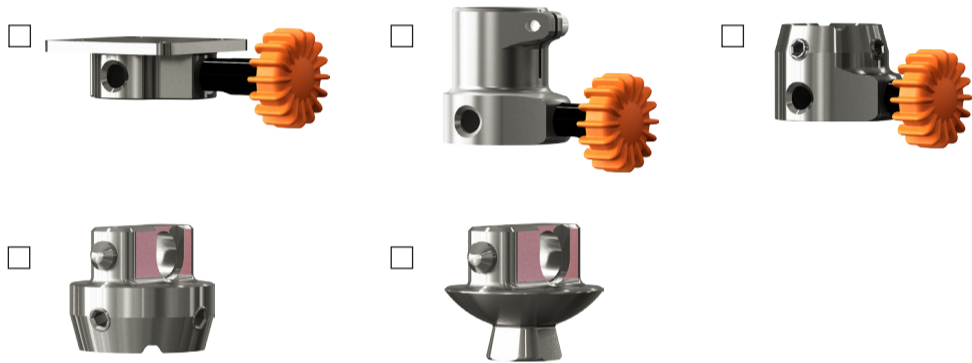


MONTERE OG DEMONTERE XTEND CONNECT FOR Å MONTERE EN ANNEN PROTESEKOMPONENT, F.EKS. EN ANNEN FOT

Det er viktig at du følger disse trinnene ved montering og demontering av Xtend Connect.

- Påse at alle komponenter er innen rekkevidde før du starter montering, demontering og bytte av protese komponenter. **DETTE ER SVÆRT VIKTIG!** ⚠️
- Sett deg ned på en stødig stol, krakk eller benk før du starter montering, demontering eller bytte av protese komponenter.
- Dobbeltsekk at du har alle komponenter innen rekkevidde, inklusive den protesedelen som du skal bytte til.
- Åpne låsehjulet fullt ut gjennom å vri det moturs. Du skal fortsette å vri til hjulet skyves ut i ytterposisjon. Du kan kontrollere at hjulet er i ytterste posisjon ved å trykke lett på utsiden av hjulet. Hvis hjulet fjærer lett og straks hopper tilbake, er det i sin ytterposisjon.
- Trykk inn sikkerhetstrykknappen, og løsne basisenheten fra hurtigfestet (bilde 1). Det kan være lurt å ha en myk matte under eller ta imot proteseenheten med den ledige hånden.
- Ta den andre protese komponenten, og før basisenhetens hannel inn i hurtigfestets hannel. Lytt nøye etter kneppelyden fra sikkerhetstrykknappen. Vær forsiktig, slik at du ikke klemmer fingrene når du monterer delene. Unngå å holde i Xtend Connect når du knepper sammen delene. Det er ellers fare for at du klemmer deg (bilde 2).
- Når delene har klikket sammen, trykker du inn og vrir samtidig medurs for å låse hjulet (bilde 3). Fortsett å skru medurs til hjulet når bunnen og stopper (bilde 4).



Bilde 1

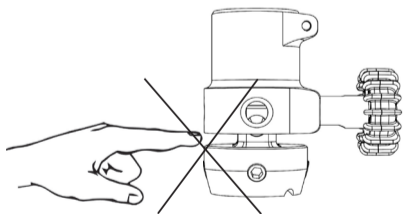

Bilde 2



Bilde 3



Bilde 4

- Kontroller at den nye protesedelen sitter hele tiden ved å vrikke litt på den nye delen. Den skal være helt fast, og delene må ikke rotere eller gi fra seg lyd. Ved lyd trekker du til låsehjulet til helt låst posisjon.
- Deretter kan du reise deg opp og fortsette å bruke protesebenet akkurat som vanlig.

Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40 B, 302 41 Halmstad
info@lindhe.se
Telefon: 035-262 92 00
www.lindhextend.com

RENGJØRINGSINSTRUKS

Du bør minst en gang i uken rengjøre de to delene til Xtend Connect. Vi anbefaler at varmt vann og et skånsomt rengjøringsmiddel brukes. Gjør slik:

- Ta av deg protesebenet. *Tips: Sitt på en stol ved vaskstedet.*
- Del komponentene i to deler
- Rengjør begge komponentene. De skal fortsatt sitte igjen på sine respektive protesebendeler. Du kan enten senke dem ned i et bad eller holde dem under rennende vann. Skrub litt lett med et mildt vaskemiddel. *Tips: Det kan være lurt å bruke bomullspinne.*
- Skyll nøye.
- Tørk av med en lufri, tørr klut eller papir, slik at flatene blir rene og tørre.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Hvis det oppstår lyd i komponenten eller den er vanskelig å demontere eller montere, må du demontere delene og rengjøre hurtigkoblingen. Se instruks. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du din ortopediingeniør.
- Xtend Connect tåler vann. Hvis detaljen er senket ned i vann, særlig salt- og bassengvann, må du gjerne skylle av komponenten for å unngå at det dannes salt- eller kloravleiringer siden dette kan motvirke en smidig og enkel montering.
- Hvis komponenten har vært utsatt for sand eller smuss, må du demontere de to delene og rengjøre dem ifølge rengjøringsinstruksen.
- Komponenten er utviklet for å tåle temperaturer fra -20 °C til +80 °C.
- ⚠️ Hvis du øker i vekt opp til over 100 kg, må du snarest kontakte din ortopediingeniør. Komponentens maksvekt er 100 kg og må ikke overstiges.
- Hvis du løfter tung last ofte og lasten sammen med vekten din overstiger 100 kg, skal du ikke bruke Xtend Connect. Maksimumsvekten på 100 kg og må ikke overstiges.
- Vær oppmerksom på endringer i eller tap av funksjon. Eksempel på dette er dårligere passform, treghet ved bytte eller rotasjon i sideretning. Kontakt din ortopediingeniør hvis dette skjer, og bruk ikke produktet før funksjonen er undersøkt.
- Vi anbefaler at Xtend Connect inspiseres av en ortopediingeniør hver sjette måned. Ved svært aktiv bruk kan det være nødvendig med kortere intervaller.
- ⚠️ Produktet er ikke egnet til høyintensiv løping.

Å MONTERE OG DEMONTERE XTEND CONNECT FOR Å F.EKS. TA PÅ SEG EN TRANG BUKSE

Det er viktig at du følger de tidligere trinnene ved montering og demontering av Xtend Connect. Når du må ta på deg trang bukse, skal du også tenke spesifikt på dette:

Når du har demontert dine protesedeler ved hjelp av Xtend Connect, skal du ta på det den trange buksen over den øvre delen av protesen og dra opp buksebenet så langt som protesehylsen tillater (bilde 5). Deretter kan du koble sammen Xtend Connect igjen og trekke ned buksen over den nedre delen av protesebenet og fortsette påkledningen (bilde 6). Tenk på alltid å sitte ned når du demonterer / monterer Xtend Connect.



Bilde 5



Bilde 6

⚠️ ADVARSLER PASIENT

- Xtend Connect kan ikke demonteres når du står opp. Det kan føre til at du faller.
- Vær forsiktig, slik at du ikke klemmer fingrene når du monterer Xtend Connect (bilde 2).
- Du må absolutt ikke gå på Xtend Connect hvis ikke delene er riktig montert sammen og riktig låst. Det kan ellers føre til at du ruller og skader deg.
- Hvis du befinner deg i varme omgivelser, må du være oppmerksom på varme deler på Xtend Connect.
- Unngå svært sure eller alkaliske rengjøringsmidler ved rengjøring av delene til Xtend Connect.
- Produktet er ikke tilpasset høyintensiv løping.
- Husk at sand og smuss kan gjøre det vanskelig å montere og demontere Xtend Connect, f.eks. ved bruk ved stranden.
- Dette produktet kan bare installeres på protesen av autorisert ortopediingeniør.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er maksimumsvekten for Xtend Connect?

Maksimumsvekten for å bruke Xtend Connect er 100 kg.

Hvilke øvrige komponenter, f.eks. kneledd, passer til Xtend Connect?

Xtend Connect passer til de fleste systemer som har hunn- eller hannpyramide, rørløsning i 30 mm eller en fire-hullsløsning.

Xtend Connect lager lyd. Hvordan kan jeg korrigere det?

Årsaken til lyden må analyseres. Begynne først med å rengjøre Xtend Connect og prøv deretter igjen. Hvis dette ikke hjelper, kontakter du din ortopediingeniør snarest og bruker ikke Xtend Connect i mellomtiden.

Kan jeg løpe med Xtend Connect?

Xtend Connect tåler lavintensiv jogging, men er ikke tilpasset høyintensiv løping. Snakk med din ortopediingeniør.

Kan jeg svømme med Xtend Connect?

Ja, Xtend Connect tåler både salt- og bassengvann. Men det er viktig at de tilkoblende komponentene også er laget for dette. Snakk med din ortopediingeniør.

Protesen min har blitt skitten, hvordan gjør jeg den ren?

Xtend Connect kan demonteres i to deler, akkurat som ved vanlig bruk. Følg instruksen for rengjøring som du finner i brukerhåndboken.

Xtend Connect går tregt når jeg prøver å montere den. Hva skal jeg gjøre?

Xtend Connect skal være lett å montere. Påse først at du ikke har fått smuss eller sand på de tilkoblende delene, eller at det er kommet stein inn i tilkoblingen. Følg instruksen for rengjøring som du finner i brukerhåndboken. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte din ortopediingeniør.

Låsehjulet som skal låse Xtend Connect, går opp for lett?

Låsehjulet skal være ganske tregt for å sørge for en sikker låsing. Hvis det er for løst, bør du kontakte din ortopediingeniør for å analysere årsaken. Unngå å bruke produktet til du har konsultert din ortopediingeniør.

XTEND CONNECT glipper, hva skal jeg gjøre?

Påse at låsehjulet er korrekt skrudd inn. Trykk inn og vri samtidig og skru så langt det går til hjulet når bunnen og stopper.

Hvis dette ikke fungerer, demonterer og rengjør du Xtend Connect ifølge rengjøringsinstruksen. Monter igjen.

Hvis ikke dette fungerer, kontakter du din ortopediingeniør.

Hvor hardt skal jeg trekke til låsehjulet?

Du må trekke til helt til det stopper. Hvis Xtend Connect glipper eller gir lyd fra seg, er det mest trolig at du ikke har trukket til ordentlig. Trekk da til litt mer.